

SKALPELOVÉ ČEPELKY

Sterilní skalpelové čepelky,
karbonová ocel, bez latexu

Použití v souladu s určeným účelem

Pro rozříznutí tkáně a další postupy, které vyžadují ostrou čepel k propíchnutí nebo řezu. Chirurgické čepelky jsou zabaleny do oddělitelných fóliových obalů. Každá čepelka je zabalena do fóliového obalu jednotlivě, aby se zamezilo poškození ostří při kontaktu s jinou čepelí. Čepelky z karbonové oceli mají ochrannou vrstvu VCI.

Pro odhalení čepelky se doporučuje rozevřít ve sterilním prostředí fóliový obal do poloviny. Nenechte vypadnout čepelku z obalu. Fóliový obal má označení, které jasně ukazuje, ve kterém směru musí být rozevřen.

Čepelku lze přímo nasadit na kovovou rukojeť nasunutím rukojeti na otvor v čepelce ještě před úplným vyjmutím čepelky z obalu.

Alternativně lze čepelku vyjmout pinzetou a připevnit k rukojeti, jak je znázorněno na připojeném nákresu.

Zejména je nutné dbát na to, aby obal nebyl v žádném případě otevřen v nesterilním prostředí, protože jinak čepelka, která byla předtím sterilizována minimální dávkou gama záření 25 kGy, bude nesterilní. Předpokladem jsou správné postupy jako při použití jakéhokoli sterilního nástroje.

Během používání zamezte kroucení, ohnutí nebo vystavení čepelky nadměrné síle resp. zátěži, aby nedošlo ke zlomení čepelky.

Upozornění

Čepelky jsou extrémně ostré. Zacházejte s nimi opatrně. Ostré předměty jsou po použití kontaminovány. Poranění může vyvolat onemocnění.

Další informace naleznete také ve směrnících AORN, CDC, OSHA nebo jiných lokálních organizací pro stanovení standardů ohledně manipulace s ostrými lékařskými nástroji a jejich likvidaci. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Likvidace

Při likvidaci je třeba věnovat dostatečnou péči, aby se zabránilo jakémukoli kontaktu nebo zranění ostrou čepelkou. Doporučuje se likvidovat čepelky v předepsaných kontejnerech na ostré předměty.

Přípevnění čepelky

Uchopte čepelku pinzetou nebo podobným nástrojem a zamezte kontaktu s břitem.

1. Držte rukojeť v levé ruce objímkou nahoru.
2. Umístěte čepelku kousek nad objímku rukojeti a spojte otvor čepelky s objímkou.
3. Posuňte čepelku dál, dokud nezapadne

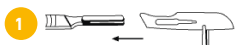

Odstranění čepelky

4. Uchopte čepelku pinzetou nebo podobným nástrojem. Špičkou ukazováčku zvednete konec čepelky v bodě „A“, zamezte přitom kontaktu s břitem a opatrně vysuňte čepelku z rukojeti.



! Jen pro jednorázové použití: Opakované použití může způsobit dodatečnou kontaminaci nebo pooperační komplikace. Integrita výrobku může být ohrožena jakýmkoliv procesy čištění nebo opětovné sterilizace.

Tento produkt lze zakoupit v následujících variantách: HEIK10, HEIK10A, HEIK11, HEIK11P, HEIK12, HEIK12D, HEIK13, HEIK15, HEIK15C, HEIK15SM, HEIK18, HEIK19, HEIK20, HEIK21, HEIK22, HEIK22A, HEIK23, HEIK24, HEIK25, HEIK36
Tento návod k použití platí pro všechny produkty začínající označením HEIK



Nepoužívat opakovaně.
Do not re-use.



Nepoužívat obsah pokud je obal poškozen.
Do not use if package is damaged.



Chránit před vlhkem.
Keep dry.



Spotřebovat do
Use by date



Číslo šarže
Batch code



Chránit před slunečním světlem.
Keep away from sunlight.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Teplotní omezení.
Temperature Limitations.



Sterilizace gama zářením.
Sterilized using irradiation.



Datum výroby
Date of manufacture



Katalogové číslo
Catalogue number



Dbát návodu k použití
Consult instruction for use



Pozor
Caution



Opětovně nesterilizovat
Do not re-sterilize

